

Anpassung der orthokeratologischen Kontaktlinse DreamLens:

Anamnese und Abgabe

Anamnese und Vorgespräch

1.

- › ausführliche Anamnese mit Fragen nach:
 - › systemischen Krankheiten
 - › Verletzungen und/oder Krankheiten am Auge
 - › ausgeprägter Augentrockenheit
 - › der Bereitschaft zur Compliance
 - › Myopie-Progression / Myopie-Management
- › Informationen zur Anpassung (Anpass-Protokoll nutzen):
 - › Zeitaufwand
 - › Tragepause der bisherigen Kontaktlinsen
 - › Eingewöhnungsphase
 - › Anwendung und Funktionalität
 - › Kontrollintervalle
 - › Kosten
- › ausführliche Inspektion des vorderen Augenabschnitts
 - › mit und ohne Fluorescein
- › subjektive Refraktion
 - › Sph bis -5,00 dpt.
 - › Cyl. rectus bis -2,50 dpt
 - › Cyl. inversus / obliquus bis -1,50 dpt
 - › Addition 1,00 dpt geringer als die Fernstärke
- › Topographie
 - › Messbereich mindestens 60 %
 - › zentrische Fixation
 - › Corneadurchmesser bestimmen
 - › Cornearadien zwischen 7,05 und 8,30 mm

Anpassung und Betreuung:

- › Der Anpassprozess sollte nachvollziehbar dokumentiert werden (Spaltlampenbefunde, Topographie, VSC / VCC).
- › Ihre Kunden sollten die DreamLens-Kontaktlinsen zu jedem Termin im Behälter mitbringen (außer, sie befinden sich auf dem Auge).
- › Bei jedem Kontrolltermin bitte immer wieder Komfort, Handling und Compliance erfragen und eventuell offene Fragen Ihrer Kunden ansprechen und klären.

2.

Bestellung und Abgabe DreamLens

- › Bestellungen
 - › DreamLens-Bestellung und Datenübermittlung via VISAVY®-Software
 - › Bestellung Premium-Peroxidpflege Perfect Aqua Plus Intensive Clean
- › Abgabe vor der 1. Nacht
 - › V_{sc} binokular prüfen
 - › Inspektion der Augen (besonders Cornea) ohne und mit Fluorescein
 - › DreamLens aufsetzen
 - › Fluoresceinbild mit aufgesetzter DreamLens
 - › Visus mit DreamLens binokular prüfen
- › Auf- und Absetzen üben
 - › DreamLens mit Kochsalzlösung gefüllt aufsetzen
 - › vor dem Absetzen Benetzungslösung anwenden und Bewegung der Linse auf dem Auge prüfen
- › Pflege mit Perfect Aqua Plus Intensive Clean erklären und testen lassen
- › Tragezeiten besprechen
 - › optimal 8 Stunden
 - › mindestens 6 Stunden
 - › auf das ausschließliche Tragen im Schlaf hinweisen
- › Folgetermine abstimmen
 - › Erster Kontrolltermin findet nach der ersten Nacht statt
 - › Kunde kommt mit aufgesetzten DreamLens zum Termin

MPG&E-Anpassberatung: Erfolgs-Check schon vor der ersten Bestellung

Sprechen Sie uns bei Fragen zur DreamLens-Anpassung gerne an, vor allem wenn es um die Analyse von Hornhauttopographie, Sehstärke und Sehanforderungen Ihrer Kunden bzw. Patienten geht. Gemeinsam finden wir so schon vor der ersten Bestellung heraus, wie Erfolg versprechend die Anpassung ist.


Kontakt: Tel.: +49 4322 750-600 / Fax: +49 4322 750-900 E-Mail: beratung@mpge.de
WhatsApp: +49 172 424 26 08

Anpassung der orthokeratologischen Kontaktlinse DreamLens: Kontrolltermine

3. Erster Kontrolltermin

Morgens, nach der 1. Nacht


- › Kunde kommt mit aufgesetzten DreamLens
- › Fluoresceinbild mit aufgesetzter DreamLens
- › Augen benetzen und DreamLens absetzen
- › Visus ohne DreamLens prüfen
- › evtl. Refraktion für Übergangskorrektur (BSG)
- › Topographie
- › Inspektion des vorderen Augenabschnitts (besonders der Cornea) ohne und mit Fluorescein

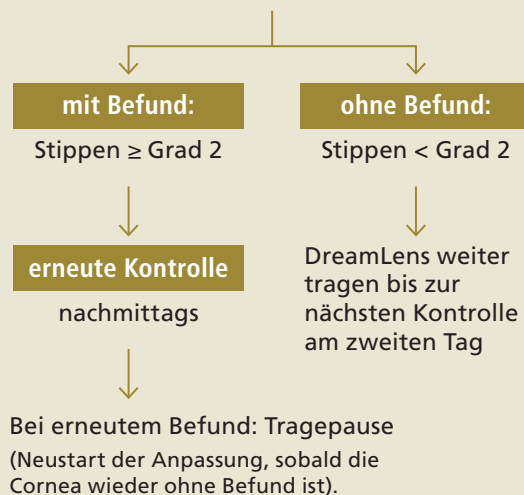

4. Zweiter und dritter Kontrolltermin


Nachmittags, nach der 3. und 5. Nacht

- › Kunde kommt jeweils ohne DreamLens auf dem Auge
- › Visus ohne DreamLens prüfen (binokularer Visus sollte sich weiter steigern und über mehrere Stunden stabil bleiben)
- › Topographie
- › Inspektion des vorderen Augenabschnitts (besonders Cornea) ohne und mit Fluorescein

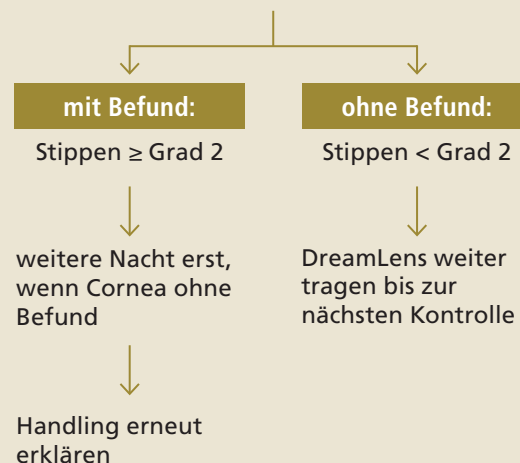

5. Vierter und fünfter Kontrolltermin

Nach 14 Tagen und einem Monat

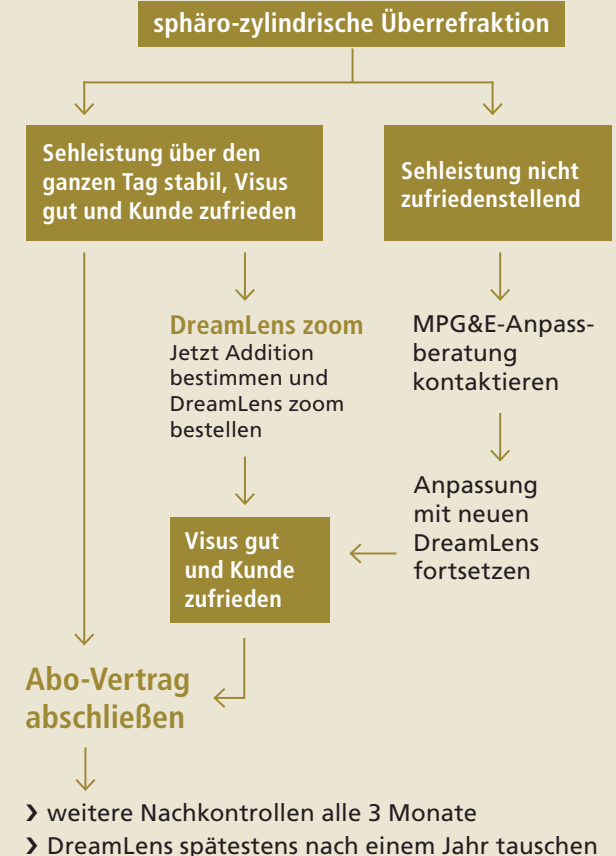

Anpassung und Betreuung:

- › Der Anpassprozess sollte nachvollziehbar dokumentiert werden (Spaltlampenbefunde, Topographie, VSC / VCC).
- › Ihre Kunden sollten die DreamLens-Kontaktlinsen zu jedem Termin im Behälter mitbringen (außer, sie befinden sich auf dem Auge).
- › Bei jedem Kontrolltermin bitte immer wieder Komfort, Handling und Compliance erfragen und eventuell offene Fragen Ihrer Kunden ansprechen und klären.

MPG&E-Anpassberatung: Erfolgs-Check schon vor der ersten Bestellung

Sprechen Sie uns bei Fragen zur DreamLens-Anpassung gerne an, vor allem wenn es um die Analyse von Hornhauttopographie, Sehstärke und Sehanforderungen Ihrer Kunden bzw. Patienten geht. Gemeinsam finden wir so schon vor der ersten Bestellung heraus, wie Erfolg versprechend die Anpassung ist.

Kontakt: Tel.: +49 4322 750-600 / Fax: +49 4322 750-900 E-Mail: beratung@mpge.de
WhatsApp: +49 172 424 26 08