

# SUPER NATURAL: ANPASSLEITFADEN FUSION 1DAY VISTA

Neues natürliches  
Sehen für die Alters-  
gruppe zwischen 6  
und min. 70 Jahren

Die Anpassung der Tagesaustausch-Kontaktlinse fusion 1day vista unterscheidet sich aufgrund ihres besonderen Designs von der normaler Einstärken-Kontaktlinse. Nutzen Sie deshalb für eine erfolgreiche Kontaktlinsen-Anpassung diesen Leitfaden.



MESSEN	1	<b>Objektive Refraktion</b> › komplette objektive Refraktion mit Auto-Refraktometer oder Skiaskop
	2	<b>Subjektive Refraktion bestimmen, bestes sphärisches Glas notieren</b> › Visus immer binokular messen
WÄHLEN	3	<b>Kontaktlinse auswählen</b> › Stärke des besten sphärischen Glases (HSA 0) +0,50 dpt
ÜBERPRÜFEN	4	<b>Anpasserfolg beurteilen</b> › nach dem Aufsetzen zunächst 5 Minuten warten › Die Sehqualität in einer Alltagssituation vom Kunden / Patienten beurteilen lassen › bei binokularem Fern-Seh-Eindruck abwechselnd ein Probierring mit +0,25 dpt vor jedes Auge halten › Akzeptanz von weiteren +0,25 dpt abfragen › bei Vorliegen der Akzeptanz Kontaktlinsenwert um +0,25 dpt erhöhen
	5	<b>bei Bedarf nachkorrigieren</b> › bei binokularem Seheindruck abwechselnd ein Probierring mit -0,25 dpt vor jedes Auge halten und erfragen, auf welcher Seite die binokulare Fernsicht deutlich verbessert wird › Kontaktlinsenwert bei deutlicher Verbesserung um 0,25 dpt reduzieren

MPG&E Handel und Service GmbH  
Moorweg 105, 24582 Bordesholm  
Service-Hotline: +49 4322 750-500  
E-Mail: info@mpge.de  
Internet: www.mpge.de  
Onlineshop: www.onlineshop.mpge.de

**Safilens**  
VISION INNOVATORS

Premium-Vertriebspartner  
Deutschland  
**MPG&E**  
Kontaktlinsen. Professionell.

## Kontaktlinsenwert mittels BSG berechnen: bei Hyperopie

bestes sphärisches Glas (HSA 12 mm)	HSA 0	Vista-Bestellwert
+0.25	+0.25	+0.75
+0.50	+0.50	+1.00
+0.75	+0.75	+1.25
+1.00	+1.00	+1.50
+1.25	+1.25	+1.75
+1.50	+1.50	+2.00
+1.75	+1.75	+2.25
+2.00	+2.00	+2.50
+2.25	+2.25	+2.75
+2.50	+2.50	+3.00
+2.75	+2.75	+3.25
+3.00	+3.00	+3.50
+3.25	+3.25	+3.75
+3.50	+3.50	+4.00
+3.75	+3.75	+4.50
+4.00	+4.25	+5.00
+4.25	+4.50	+5.00
+4.50	+4.75	+5.50
+4.75	+5.00	+5.50
+5.00	+5.25	+6.00
+5.25	+5.62	+6.00
+5.50	+5.87	+6.00
+5.75	+6.12	+6.50
+6.00	+6.50	+7.00

## Kontaktlinsenwert mittels BSG berechnen: bei Myopie

bestes sphärisches Glas (HSA 12 mm)	HSA 0	Vista-Bestellwert
-0.00	-0.00	+0.50
-0.25	-0.25	+0.25
-0.50	-0.50	-0.00
-0.75	-0.75	-0.25
-1.00	-1.00	-0.50
-1.25	-1.25	-0.75
-1.50	-1.50	-1.00
-1.75	-1.75	-1.25
-2.00	-2.00	-1.50
-2.25	-2.25	-1.75
-2.50	-2.50	-2.00
-2.75	-2.75	-2.25
-3.00	-3.00	-2.50
-3.25	-3.25	-2.75
-3.50	-3.50	-3.00
-3.75	-3.75	-3.25
-4.00	-3.87	-3.50
-4.25	-4.00	-3.50
-4.50	-4.25	-3.75
-4.75	-4.50	-4.00
-5.00	-4.75	-4.25
-5.25	-5.00	-4.50
-5.50	-5.12	-4.75
-5.75	-5.37	-5.00
-6.00	-5.62	-5.25
-6.50	-6.00	-5.50
-7.00	-6.50	-6.00
-7.50	-6.87	-6.50
-8.00	-7.25	-7.00
-8.50	-7.75	-7.50
-9.00	-8.12	-7.50
-9.50	-8.50	-8.00
-10.00	-8.87	-8.50
-10.50	-9.37	-9.00
-11.00	-9.75	-9.50
-11.50	-10.12	-9.50
-12.00	-10.50	-10.00
-12.50	-11.01	-10.50
-13.00	-11.25	-11.00
-13.50	-11.62	-11.50
-14.00	-11.99	-12.00